

USAGE PREVU

- Le Laryngoscope Combi Metal Max+ est utilisée afin d'éclairer l'oropharynx et la trachée pour aider à l'intubation endotrachéale ou permettre l'examen de la cavité buccale.
- Ce laryngoscope est livré avec des batteries 6V pré-installées de type pile bouton, et il est prêt à l'emploi.

AVERTISSEMENTS

- Une formation spécifique est requise pour effectuer une intubation trachéale. L'utilisation de ce dispositif est réservée aux professionnels formés et compétents.
- Ensemble laryngoscope à charnière fixe. La lame et le manche ne sont pas interchangeables.
- PROACT Medical recommande de n'effectuer une intubation que si un plan complet de re-change est en place, en cas d'intubation difficile causée par une panne de l'équipement ou des complications physiologiques. Ce plan doit comprendre la disponibilité de dispositifs de secours et de moyens alternatifs pour garantir la ventilation.
- La réutilisation de dispositifs médicaux prévus pour un usage unique est associée à des dangers d'infection croisée et peut compromettre l'intégrité, la fonctionnalité ou l'efficacité clinique des dispositifs.
- Si l'un de ces dispositifs est impliqué dans un incident clinique grave, veuillez le signaler aux autorités locales compétentes.

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Ne pas utiliser ce dispositif si les contrôles suivants n'ont pas été effectués avant chaque utilisation

- Vérifiez que le dispositif et les batteries sont intacts, ne présentent pas d'arêtes coupantes, et ne sont pas endommagés, défectueux ou incomplet.
- Allumez et éteignez le laryngoscope à deux reprises avant utilisation pour vérifier son bon fonctionnement et un éclairage constant lorsqu'une pression est exercée sur le bout de la lame dans toutes les directions.

MODE D'EMPLOI

- Choisissez le dispositif dont la taille est adaptée au patient.
- Pour l'allumer, tirez la lame vers le haut et verrouillez-la une fois en position.
- La lumière s'activera automatiquement.
- Examinez ou intubez la trachée conformément aux directives médicales actuelles en pratique.
- Retirer les batteries après utilisation en dévissant la partie inférieure du manche. Les Batteries doivent être recyclées après utilisation selon les normes locales en vigueur.

MANCHE & LAME LARYNGOSCOPE COMBI METAL MAX+

Référence	Style	Taille	Piles Fournies	Longueur Lame (mm)	Largeur Lame (mm)
MMCB50MAC0	Macintosh	0	4LR44 6V	61	8.5
MMCB50MAC1	Macintosh	1	4LR44 6V	75	8.5
MMCB50MAC2	Macintosh	2	4LR44 6V	93	11.5
MMCB50MAC3	Macintosh	3	4LR44 6V	110	14
MMCB50MAC4	Macintosh	4	4LR44 6V	135	14
MMCB50MAC5	Macintosh	5	4LR44 6V	156	10.5
MMCB50MIL00	Miller	00	4LR44 6	44	10.5
MMCB50MIL0	Miller	0	4LR44 6V	55	10.5
MMCB50MIL1	Miller	1	4LR44 6V	81	10.5
MMCB50MIL2	Miller	2	4LR44 6V	131	13
MMCB50MIL3	Miller	3	4LR44 6V	170	13
MMCB50MIL4	Miller	4	4LR44 6V	182	17
MMCB50CP00	Cardiff Pro	00	4LR44 6V	55	8
MMCB50CP0	Cardiff Pro	0	4LR44 6V	71	9
MMCB50CP1	Cardiff Pro	1	4LR44 6V	77	10

MANCHE & LAME LARYNGOSCOPE COMBI METAL MAX+



USAGE UNIQUE



NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT IRM



SANS LATEX



Acorn Regulatory
Consultancy Services Ltd.
Knockmorris, Cahir,
Co. Tipperary, E21 R766, Ireland



PROACT Medical Ltd

9-13 Oakley Hay Lodge, Great Folds Road, Oakley Hay Business Park
Corby, Northants, NN18 9AS, UK
Tel: +44 (0)1536 461981 E-mail: sales@proactmedical.co.uk

Distributed in North America by:
NEXT Medical Products Company
45 Columbia Road, Branchburg, NJ 08876

IFU 301-V2-2019-04