

USAGE PREVU

- Le Laryngoscope Combi Metal Max+ est utilisée afin d'éclairer l'oropharynx et la trachée pour aider à l'intubation endotrachéale ou permettre l'examen de la cavité buccale.
- Ce laryngoscope est livré avec des batteries 6V pré-installées de type pile bouton, et il est prêt à l'emploi.

AVERTISSEMENTS

- Une formation spécifique est requise pour effectuer une intubation trachéale. L'utilisation de ce dispositif est réservée aux professionnels formés et compétents.
- Ensemble laryngoscope à charnière fixe. La lame et le manche ne sont pas interchangeables.
- PROACT Medical recommande de n'effectuer une intubation que si un plan complet de rechange est en place, en cas d'intubation difficile causée par une panne de l'équipement ou des complications physiologiques. Ce plan doit comprendre la disponibilité de dispositifs de secours et de moyens alternatifs pour garantir la ventilation.
- La réutilisation de dispositifs médicaux prévus pour un usage unique est associée à des dangers d'infection croisée et peut compromettre l'intégrité, la fonctionnalité ou l'efficacité clinique des dispositifs.
- Si l'un de ces dispositifs est impliqué dans un incident clinique grave, veuillez le signaler aux autorités locales compétentes.

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Ne pas utiliser ce dispositif si les contrôles suivants n'ont pas été effectués avant chaque utilisation

- Vérifiez que le dispositif et les batteries sont intacts, ne présentent pas d'arêtes coupantes, et ne sont pas endommagés, défectueux ou incomplet.
- Allumez et éteignez le laryngoscope à deux reprises avant utilisation pour vérifier son bon fonctionnement et un éclairage constant lorsqu'une pression est exercée sur le bout de la lame dans toutes les directions.

MODE D'EMPLOI

- Choisissez le dispositif dont la taille est adaptée au patient.
- Pour l'allumer, tirez la lame vers le haut et verrouillez-la une fois en position.
- La lumière s'activera automatiquement.
- Examinez ou intubez la trachée conformément aux directives médicales actuelles en pratique.
- Retirer les batteries après utilisation en dévissant la partie inférieure du manche. Les Batteries doivent être recyclées après utilisation selon les normes locales en vigueur.

MANCHE & LAME LARYNGOSCOPE COMBI METAL MAX+



MANCHE & LAME LARYNGOSCOPE COMBI METAL MAX+

| Référence | Style | Taille | Piles Fournies | Longueur Lame (mm) | Largeur Lame (mm) |
|-------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------------|
| MMCB90MAC0 | Macintosh | 0 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 61 | 8.5 |
| MMCB90MAC1 | Macintosh | 1 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 75 | 8.5 |
| MMCB90MAC2 | Macintosh | 2 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 93 | 11.5 |
| MMCB90MAC2A | Macintosh | 2 | 2 x 3V Pile Bouton | 93 | 11.5 |
| MMCB90MAC3 | Macintosh | 3 | 2 x 3V Pile Bouton | 110 | 13.5 |
| MMCB90MAC35 | Macintosh | 3.5 | 2 x 3V Pile Bouton | 122 | 13.5 |
| MMCB90MAC3S | Macintosh | 3 | 2 x 3V Pile Bouton | 110 | 13.5 |
| MMCB90MAC4 | Macintosh | 4 | 2 x 3V Pile Bouton | 135 | 14 |
| MMCB90MAC4S | Macintosh | 4 | 2 x 3V Pile Bouton | 135 | 14 |
| MMCB90MAC5 | Macintosh | 5 | 2 x 3V Pile Bouton | 156 | 14 |
| MMCB90MIL00 | Miller | 00 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 44 | 10.5 |
| MMCB90MIL0 | Miller | 0 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 55 | 10.5 |
| MMCB90MIL1 | Miller | 1 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 81 | 10.5 |
| MMCB90MIL15 | Miller | 1.5 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 100 | 10.5 |
| MMCB90MIL2 | Miller | 2 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 131 | 13 |
| MMCB90MIL2A | Miller | 2 | 2 x 3V Pile Bouton | 131 | 13 |
| MMCB90MIL3 | Miller | 3 | 2 x 3V Pile Bouton | 170 | 13 |
| MMCB90MIL4 | Miller | 4 | 2 x 3V Pile Bouton | 182 | 17 |
| MMCB90LT3 | A Levier | LT 3 | 2 x 3V Pile Bouton | 110 | 13.5 |
| MMCB90LT4 | A Levier | LT 4 | 2 x 3V Pile Bouton | 135 | 14 |
| MMCB90CP00 | Cardiff PRO | 00 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 55 | 8 |
| MMCB90CP0 | Cardiff PRO | 0 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 71 | 9 |
| MMCB90CP1 | Cardiff PRO | 1 | 4 x 1.5V Pile Bouton | 77 | 10 |



USAGE UNIQUE



NE PAS UTILISER DANS
UN ENVIRONNEMENT IRM



SANS LATEX



PROACT Medical Ltd

9-13 Oakley Hay Lodge, Great Folds Road,
Oakley Hay Business Park
Corby, Northants, NN18 9AS, UK
Tel: +44 (0)1536 461981
E-mail: sales@proactmedical.co.uk

Distribué en France par :
PROACT Medical SAS
30 Avenue François Mitterrand
31290 Villefranche de Lauragais
France
Tel : 05.34.65.87.09
E-mail : ventes@proactmedical.fr

IFU 301-V3-2023-01