

UTILISATION PRÉVUE

- La lame de laryngoscope HPC, lorsqu'elle est connectée à un manche compatible, est utilisée afin d'éclairer l'oropharynx et la trachée pour aider à l'intubation endotrachéale ou permettre l'examen de la cavité buccale.
- Compatible avec les manches laryngoscope en conformité avec la norme ISO 7376:2009.

AVERTISSEMENTS

Une formation spécifique est requise pour effectuer une intubation trachéale. L'utilisation de ce dispositif est réservée aux professionnels formés et compétents.

- PROACT Medical recommande de n'effectuer une intubation que si un plan complet de rechange est en place, en cas d'intubation difficile causée par une panne de l'équipement ou des complications physiologiques. Ce plan doit comprendre la disponibilité de dispositifs de secours et de moyens alternatifs pour garantir la ventilation.
- La réutilisation de dispositifs médicaux prévus pour un usage unique est associée à des dangers d'infection croisée et peut compromettre l'intégrité, la fonctionnalité ou l'efficacité clinique des dispositifs.
- Si l'un de ces dispositifs est impliqué dans un incident clinique grave, veuillez le signaler aux autorités locales compétentes.

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À L'UTILISATION

- Vérifiez que le dispositif est intact, ne présente pas d'arêtes coupantes, et n'est pas endommagé, défectueux ou incomplet.
- Allumez et éteignez le laryngoscope à deux reprises avant utilisation pour vérifier son bon fonctionnement et un éclairage constant lorsqu'une pression est exercée sur le bout de la lame dans toutes les directions.


MODE D'UTILISATION

- Choisissez le dispositif dont la taille est adaptée au patient.
- Pour l'allumer, tirez la lame vers le haut et verrouillez-la une fois en position.
- Examinez ou intubez la trachée conformément aux directives médicales actuelles en pratique.

LAME DE LARYNGOSCOPE HPC, GREEN SYSTEM

Référence	Style	Taille	Longueur Lame (mm)	Largeur Lame (mm)
HPCMAC1 ①	Macintosh	1	70	10.0
HPCMAC2 ②	Macintosh	2	90	12.0
HPCMAC3 ③	Macintosh	3	110	15.0
HPCMAC4 ④	Macintosh	4	133	15.0
HPCMIL00 ⑤	Miller	00	43	11.5
HPCMIL0 ⑥	Miller	0	56	11.5
HPCMIL1 ⑦	Miller	1	80	11.5
HPCMIL2 ⑧	Miller	2	133	13.5

LAME LARYNGOSCOPE USAGE UNIQUE HPC GREEN SYSTEM

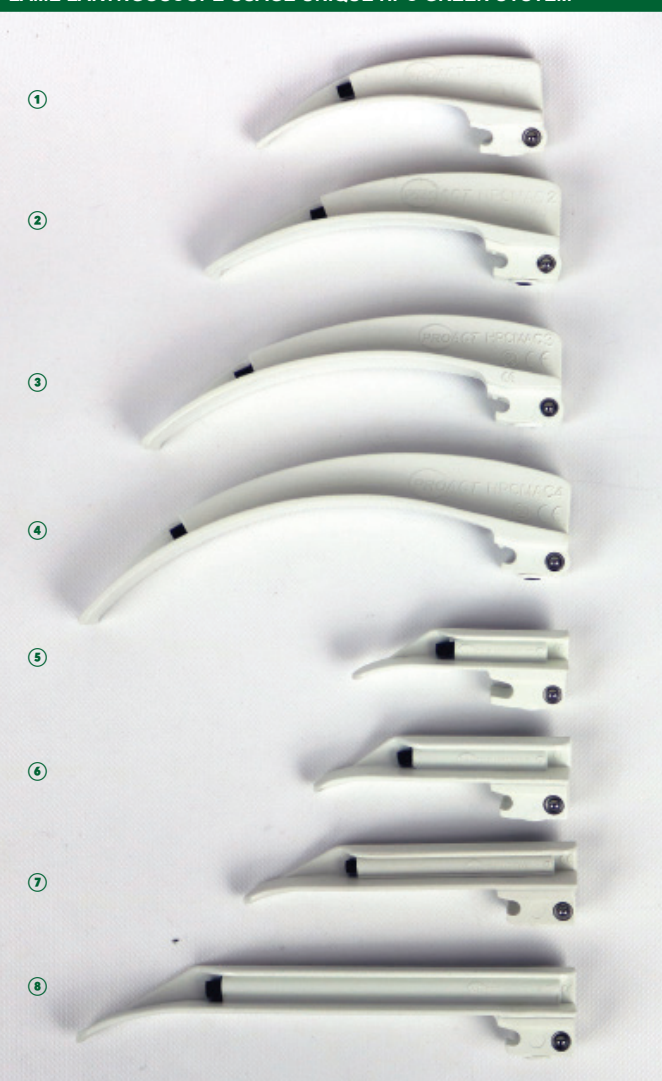

NE PAS UTILISER DANS
ENVIRONNEMENT IRM



SANS LATEX

IFU 312_FR-V2-2019-04

M

PROACT Medical Ltd

9-13 Oakley Hay Lodge, Great Folds Road, Oakley Hay Business Park
Corby, Northants, NN18 9AS, UK
Tel: +44 (0)1536 461981 E-mail: sales@proactmedical.co.uk

PROACT Medical SAS

Web: proactmedical.fr E-mail: ventes@proactmedical.fr